




欢迎!

要**筛查**结肠癌，就用我：Cologuard®

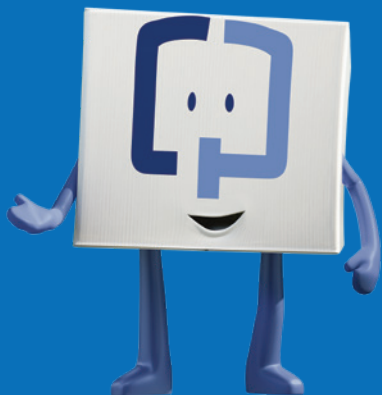

内容简介:

- 「 筛查的重要性
- 「 关于 Cologuard
- 「 实用提示
- 「 使用和寄回取样试剂盒
- 「 解读检测结果

Cologuard 旨在为 45 岁及以上、具有罹患结直肠癌一般风险的人群提供筛查。本品仅凭处方销售。
请注意查看小册子背面的重要风险信息。

为什么要进行结直肠癌筛查？

定期和及时的筛查至关重要

- 如果在早期便检测出来，治愈率可达 90%*¹
- 对于 45 岁及以上的成年人而言，筛查是发现结肠癌的重要步骤²

*基于筛查后生存 5 年及以上的病例。

参考资料

1. 国家癌症研究所 (National Cancer Institute)。SEER 癌症统计数据：结直肠癌。 <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>。数据获取日期：2020 年 2 月 5 日。
2. 美国癌症协会 (American Cancer Society)。结直肠癌可以预防吗？ <https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html>。上次修订日期：2018 年 5 月 30 日。数据获取日期：2020 年 2 月 3 日。

您的 Cologuard 试剂盒即将送达

好样的！您和您的健康护理提供者已经决定使用行之有效的非侵入式筛查方案 Cologuard 来进行结肠癌筛查

收到 Cologuard 试剂盒后：

- 「马上打开查看包装内的物品是否齐全
- 「将 Cologuard 试剂盒放在洗手间里，这样您就会记得马上使用
- 「仔细阅读附带的说明
- 「尽快使用 Cologuard 试剂盒提供粪便样本

请注意查看小册子背面的重要风险信息。



我来帮您！

扫描二维码即可观看使用方法的介绍视频：

CologuardTest.com/use

Cologuard 行之有效

此产品通过检测粪便中 DNA 的特征性改变和血液来帮助发现结肠癌



Cologuard 对于早期癌症的检出率为**92%**¹

Cologuard 在 45-49 岁成人中的效果根据 50 岁及以上患者的大型临床研究进行评估。在这项临床研究中，13% 的患者得到假阳性结果，8% 的患者则得到假阴性结果。

请注意查看小册子背面的重要风险信息。

参考资料

1. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH 等；用于结直肠癌筛查的多靶点粪便 DNA 检测。《新英格兰医学杂志》(N Engl J Med)。2014;370(14):1287-1297。

Cologuard 非常便捷

Cologuard 是一种方便易用的非侵入式筛查方法。此方法具有以下特点：

- 「 无需特殊准备。无需请假。无需改变饮食和用药
- 「 试剂盒送货上门
- 「 自己在家中采集粪便样本，保护隐私



无需等待!

收到 Cologuard 试剂盒后即可立即筛查

开始操作前的实用提示



妥善存放包装盒

您还需要用包装盒寄回您的样本。所以千万别扔掉！

让内袋留在包装盒中

寄回样本时，内袋可有效防止泄漏。切勿将其移除

合理安排时间

开始操作前，请确保您可以在取样后 24 小时内寄出样本，以便留出充足的运输时间。确保不会因周日或节假日导致运输延迟

身体不适？

如果腹泻或者尿液或粪便中含血（例如患有出血性痔疮、手上有切口或伤口或月经期间），请勿进行粪便取样



联系我们！

如需帮助，可拨打 24 小时
全天候服务热线
1-844-870-8870

如何使用 Cologuard 试剂盒



1 签收并打开 Cologuard 试剂盒。
查看日期以免使用过期产品



2 将样本容器放入马桶托架中



3 使用 Cologuard 试剂盒采集粪便样本



4 轻刮样本表面，然后将防腐液倒入
样本容器中

包装内有哪些物品？ 您所需的全套工具。



运输盒



试管



防腐液



取样容器



托架



患者说明



样本标签




方便易用！
扫描二维码即可观看使用
方法的介绍视频，或访问
CologuardTest.com/use



完成取样后做什么

- ✔ 在 **24 小时内**将盒子寄出至 Exact Sciences Laboratories
- ✔ 使用试剂盒中预付邮费的 UPS 标签
- ✔ 可在 UPS 的任一投寄点寄出您的取样试剂盒，也可以致电联系 UPS 或 Exact Sciences Laboratories 客户关怀中心预约取件服务
- ✔ 祝您生活愉快！

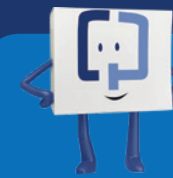

2 周内即可得到检测结果！

检测结果会自动发送给您的健康护理提供者。您无需进行任何操作。

解读检测结果

您的健康护理提供者通常会在 **2 周内** 联系您，并告知您筛查结果

+ 阳性结果

检测到由癌前息肉或结肠癌导致的异常 DNA 细胞和/或异常血细胞。

如果您的检测结果为阳性，应咨询您的健康护理提供者，并安排后续的诊断性结肠镜检查。

假阳性结果的确也会发生。当 Cologuard 的检测结果为阳性，但通过结肠镜检查并未发现癌症或癌前息肉时，即为产生了假阳性结果。

— 阴性结果

没有检测到由癌前息肉或结肠癌导致的异常 DNA 细胞和/或异常血细胞。

假阴性结果的确也会发生。当 Cologuard 并未检测到癌前息肉或结肠癌，但结肠镜检查的结果为阳性时，即为产生了假阴性结果。

美国癌症协会 (American Cancer Society) 建议，检测得到阴性结果后，仍要**每 3 年**进行一次 Cologuard 筛查¹


参考资料

1. Wolf AMD、Fontham ETH、Church TR 等一般风险成年人的结直肠癌筛查：美国癌症协会 2018 年指导方针更新。《临床医师癌症杂志》(CA Cancer J Clin). 2018;68(4):250-281。

大多数医保
患者无需支
付任何费用

Cologuard 在 Medicare 和大多数主要保险公司的 给付范围内

全国范围内 94% 以上的 Cologuard 患者没有自付
筛查费用。*

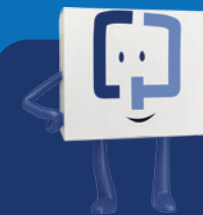


对承保范围有疑问？

我们的专家团队可随时提供帮助：
请致电 **1-844-870-8870** 或访问
CologuardTest.com/insurance

*给付费率因州和地区而异。给付费率仅适用于 Cologuard 筛查人群。

立即体验!

- 「 Cologuard 试剂盒附带完整的说明
- 「 如需观看使用方法的介绍视频, 请访问 CologuardTest.com/use
- 「 我们提供 24 小时全天候服务。请致电 **1-844-870-8870** 与我们联系
- 「 也可以访问 CologuardTest.com/WelcomeGuide 下载其他语言版本的说明

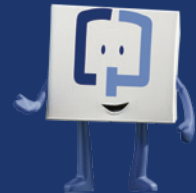

Cologuard 旨在通过检测粪便中的某些 DNA 标志物和血液, 为 45 岁及以上、具有罹患结直肠癌一般风险的人群提供筛查。如果您有腺瘤病史、炎症性肠病和某些遗传综合征, 或者个人或家族结直肠癌病史, 请勿使用此方法。Cologuard 不可作为高风险患者的结肠镜检查替代方案。Cologuard 在 45-49 岁成人中的效果根据 50 岁及以上患者的大型临床研究进行评估。Cologuard 用于重复检测的效果尚未经过评估。

应谨慎地解读 Cologuard 的检测结果。检测结果若为阳性不代表患有癌症。检测结果为阳性的患者应转诊进行诊断性结肠镜检查。检测结果若为阴性不代表未患有癌症。检测结果为阴性的患者应与医生讨论何时需要再次检测。可能出现假阳性和假阴性结果。在临床研究中, 13% 的未患癌人群得到阳性结果 (假阳性), 8% 的患癌人群得到阴性结果 (假阴性)。本品仅凭处方销售。

**EXACT
SCIENCES**

EXACT SCIENCES CORPORATION 441 Charmany Drive, Madison, WI 53719
www.ExactSciences.com | www.ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard 是 Exact Sciences Corporation 的注册商标。
©2020 Exact Sciences Corporation。保留所有权利。US.CG.2862-2020 年 2 月 1 日

 **cologuard**[®]
Rx only